



INSTRUNET® GLUTARALDEHÍDO 2%

**CENTRAL DE
COMPRA
SANITARIA**

Indicaciones

Desinfección de alto nivel en frío de material quirúrgico y endoscopios

Eficacias microbiológicas

Instrunet Glutaraldehído 2% activado es un eficaz bactericida, fungicida y viricida en 15 minutos. Adaptado según normativa europea EN-14885

Composición

Ingrediente activo solución activada: Glutaraldehído 2%

Modo de empleo

1. Lavar, aclarar y secar el instrumental a tratar.
2. Preparar la solución activada: añadir todo el contenido del sobre activador en la garrafa de 5 litros, agitar hasta obtener una solución homogénea (de color verde), lista para su utilización
3. Sumergir el instrumental en la solución desinfectante durante 15 minutos.
4. Enjuagar el instrumental con agua purificada.
5. Desechar la solución desinfectante utilizada.

Compatible con metal, vidrio, goma y caucho.

Precauciones

Información disponible en la ficha de datos de seguridad y en la etiqueta.

Presentación

Ref. 74 – Garrafa 5 litros (Caja de 2 garrafas + 2 sobres activador).

**CE
0318**

